

【形状、構造及び原理等】

①形状・構造

白色固形物 60g

成分：酸化アルミニウム、脂肪酸 他

②包装

60 g × 2/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

販売元

日新デンタル株式会社

製造販売業者

株式会社 ダイテックジャパン

住所

静岡県沼津市大平 667-7

電話番号

0559-35-1200

FAX

0559-35-1201

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材。硬質レジン、床用レジン（PMMA・ポリスルフォン）、貴金属の最終艶出しの研磨など。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ① エンジンやレーズを低速回転し、本材をバフ・ブラシ等に付着させる。
- ② エンジンやレーズを通常の回転速度に戻し、通法に従い研磨作業を行うこと。
- ③ 研磨終了後は、被研磨物を中性洗剤等で十分洗浄すること。

【使用上の注意】

- ① 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ② 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸収しないこと。
- ③ 本材の研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネなどを使用すること。
- ④ 研磨作業後は、石鹼をつけたブラシ等で十分な洗浄を行うこと。
- ⑤ 他の製品との混用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 直射日光、高温多湿は避けて保管すること。
- ② 水分、腐食性薬剤及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。