

【形状、構造及び原理等】

①形状・構造

ペースト状

成分：酸化アルミニウム、脂肪酸、水 等

色：白色

②包装

(内容量及び包装材)

50 g / ケース

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材。硬質レジン、床用レジン（PMMA・ポリスルフォン）、貴金属の最終艶出しの研磨など。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ① エンジンやレーズを低速回転し、本材をバフ・ブラシ等に付着させる。
- ② エンジンやレーズを通常の回転速度に戻し、通法に従い研磨作業を行うこと。
- ③ 研磨終了後は、被研磨物を中性洗剤等で十分洗浄すること。

【使用上の注意】

- ①本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ②本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸収しないこと。
- ③本材の研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネなどを使用すること。
- ④研磨作業後は、石鹼をつけたブラシ等で十分な洗浄を行うこと。
- ⑤他の製品との混用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 直射日光、高温多湿は避けて保管すること。
- ② 水分、腐食性薬剤及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

販売元 日新デンタル株式会社・内外歯材株式会社

製造販売業者	株式会社 ダイテックジャパン
住所	静岡県沼津市大平 667-7
電話番号	0559-35-1200
FAX	0559-35-1201