

一般医療機器

機械器具（58）整形用機械器具  
歯科インプラント技工用器材

70757000

再使用禁止

ストローマン技工用アナログ

【禁忌・禁止】

併用医療機器

・ストローマン社以外の製品と併用しないこと。

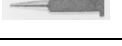
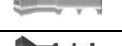
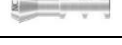
使用方法

- ・再使用禁止。
- ・本品は技工作業の際に使用するものである。口腔内では使用しないこと。
- ・プラスチック製品にはプラスチックに適さない薬品による滅菌や乾熱滅菌は行わないこと〔プラスチックの変性や溶解の危険性がある〕。
- ・本品を洗浄、消毒する場合、高濃度の塩素を含有する洗浄液や消毒液を 1 時間以上使用しないこと。また、シュウ酸を含有する洗浄液や消毒液を使用しないこと〔使用した場合、局部的腐食や接触腐食が発生する〕。
- ・鋳込み不足や鋳造体内部の気泡残留などの鋳造欠陥は修正が難しいため、製作に失敗した場合は調整を行わず、初めから製作し直すこと。

【形状・構造及び原理等】

本品の上部はインプラント又はアバットメントの形状を再現しており、下部はマスター模型内に固定するアンカー部となっている。作業模型に本品を設置することで、患者の口腔内のインプラント又はアバットメントの位置や形状を作業模型上に正確に再現することができる。

\*形状、構造

| カテゴリー | 製品番号       | 外観写真                                                                                | カテゴリー | 製品番号      | 外観写真                                                                                |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TL 用  | 048. 124   |    | BL 用  | 025. 2106 |    |
|       | 048. 129   |    |       | 023. 2754 |    |
|       | 048. 171   |  |       | 025. 0049 |  |
|       | 048. 172   |  |       | 023. 4756 |  |
|       | 048. 160   |  |       | 025. 0050 |  |
|       | 048. 161   |  |       | 023. 4757 |  |
|       | 048. 162   |  |       | 025. 4101 |  |
|       | 048. 117V4 |  |       | 025. 4102 |  |
|       | 048. 165   |  |       | 025. 4132 |  |
|       | 048. 166   |  |       | 025. 4136 |  |
|       | 048. 140   |  |       | 025. 4122 |  |
|       | 048. 108   |  |       | 025. 4126 |  |
|       | 048. 872   |  |       | 025. 4141 |  |
|       |            |                                                                                     |       | 025. 4161 |  |
| BL 用  | 025. 2101  |  |       | 025. 4106 |  |
|       | 025. 2102  |  |       | 025. 0007 |  |
|       | 025. 2112  |  |       | 025. 0008 |  |
|       | 025. 2116  |  | NN 用  | 048. 130  |  |
|       | 025. 2122  |  | SC 用  | 025. 0023 |  |
|       | 025. 2126  |  |       | 025. 0024 |  |
|       | 025. 2131  |  | アンカー用 | 048. 109  |  |
|       | 025. 2141  |  |       |           |                                                                                     |

必ずマニュアル等を参照してください

付属品

| カテゴリー | 製品番号     | 外観写真                                                                                |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ホルダー  | 046. 239 |  |

原理

本品によって、模型上に口腔内のインプラント及びアバットメントを正確に再現することができる。本品が固定された模型を使用して、各種上部構造材を設計・作製することができる。

原材料

ステンレス鋼、アルミ合金、チタン、チタン合金、ポリフェニレンスルファイド/真鍮

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作成するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 併用医療機器

本品はストローマン社製インプラントシステムと併用する。

2. 使用方法

インプラント埋入又はアバットメント装着の後に、上部に印象キャップ等(製品をそのまま使う場合もある)をセットして印象採得し、その後、印象に埋め込まれた印象キャップ等に本品を設置して作業模型を作製する。または、デジタル印象された模型に本品を設置して作業模型を作製する。本品が固定された模型を使用して、各種上部構造材を設計・作製する。

使用方法等に関連する使用上の注意

- ・アバットメントとインプラント双方のオクタゴンを合わせたのち、スクリューを締め付けること。
- ・カラーコード（組合せ可能な種類・長さの色分け）によって識別されている製品は、同じ色の製品を組合せること〔異なるカラーコードの製品を組合せた場合、不具合が生じる〕。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・包括的な患者評価と術前診断を行い、十分に治療計画を行った上で本品を使用すること。不適切な咬合付与、過剰な応力の発生等につながる不適切な設計を避けること。〔不十分な場合、骨吸収などの術後の合併症や義歯やインプラントの破折や喪失などの不具合の原因となり得る〕。
- ・手技に使用した製品の追跡可能性確保のため、使用した全ての製品ロット番号(製品の識別番号)をカルテなどの患者記録上に記録すること。尚、インプラントなど一部の製品には、ロット番号を表示したラベルが添付されており、利用することができる。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・常温・常湿で直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
- ・水分がついたままの状態、又は湿った状態では絶対に保存しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ストローマン・ジャパン株式会社

連絡先：0120-689-930

外国製造業者：Institut Straumann AG（ストローマン社）

外国製造業者国名：スイス連邦