

ストローマン PRO レジン モデル X

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる高分子からなる材料である。

2. 構成品

名称	製品番号	機能等
ストローマン PROレジン モデルX(ダークベージュ)	019. 3210	紫外線で硬化する樹脂である。
ストローマン PROレジン モデルX(アイボリー)	019. 3211	
ストローマン PROレジン モデルX(グレー)	019. 3212	
ストローマン PROレジン モデルX(ブルー)	019. 3213	

3. 形状、構造及び寸法

1)形状、寸法及び重量(許容誤差: ±10%)

(1) ストローマン PROレジン モデルX

性状: 液体

容量: 1, 000g

4. 原理

本樹脂は紫外線で硬化する。

5. 原材料

構成品	原材料
ストローマン PRO レジン モデル X	ウレタン ジメタクリレート (UDMA)
	ジアクリレート
	アクリル樹脂
	ホスフィンオキシド
	ピグメント

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる高分子からなる材料である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1)加工機で作製を行う。
- 2) ブラシ、超音波洗浄器等を用いて作成物を洗浄する。
- 3)乾燥する。
- 4)UV照射器を用いて表面硬化を行う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ 蒸気を吸入しないこと。
- ・ 本品に直接触らず、保護手袋、保護衣、保護メガネを着用すること。皮膚に触れた場合、石鹼と水で十分に洗い流すこと。皮膚に刺激や発疹が生じた場合は、医師の診察を受けること。[アレルギー性の皮膚反応を起こす可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光を避け、涼しい場所で保管すること。

2. 有効期間: 24 か月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ストローマン・ジャパン株式会社

連絡先: 0120-418-320

外国製造業者: DeltaMed GmbH

外国製造業者国名: ドイツ