

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

ECG リード KM-ECG-3LEAD-IECGP1WR

【禁忌・禁止】


- ・MRI でのご使用はできません。(誘導起電力による局所的な発熱で火傷を負うことがあります。)

【形状・構造等】

1. 形状・構造

本品はクリップで電極に接続し、リード線を介して心電図を測定するためのケーブルです。

- ・ ECG リード (3 リード)

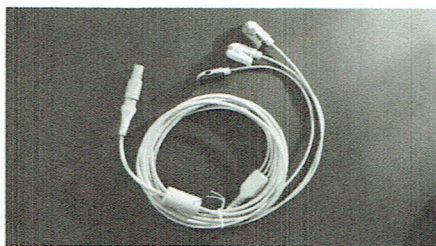

2. 原材料

名称	原材料
ECG リード	真鍮金メッキ、PEI (ポリエーテルイミド樹脂)、銀メッキ銅箔糸線、TPU (熱可塑性ポリウレタン)

【使用目的、効能又は効果】

患者の心電図信号を心電計に伝達する。

【操作方法又は使用方法等】

- ① ECG リードのクリップを広げ、電極パット (メーカー純正部品をご使用下さい。) のスナップボタンに挟んで下さい。
- ② 心電計本体 (申請対象外) に ECG リードのコネクターを挿入して下さい。中央のピンに誤挿入防止のための凸部が 2 箇所あるので、向きに注意しながらしっかりと挿入して下さい。
- ③ コネクターを本体から抜く場合は、矢印の入ったリングを手前にずらしながらロックを外し、ゆっくりと引き抜いて下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・使用前には必ず添付文書をお読み下さい。
- ・指定の心電計以外への接続は行わないで下さい。重大な事故の原因となることがあります。
- ・本品に改造を施さないでください。
- ・本品を心電計から抜くとき、また電極を外すときは、コードを持たずにコネクタやチップ部を持って引き抜いて下さい。断線の恐れがあります。
- ・オートクレーブ滅菌不可

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保存環境：-20℃～60℃

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないで下さい。

【包装】

1 個/1 梱包

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

連絡先 (販売業者)：コニカミノルタ株式会社

住所：東京都日野市さくら町 1 番地

TEL：042-589-8421

製造販売業者：タヤインターナショナル株式会社

住所：大阪府吹田市市江の木町 2 番 31 号

外国製造業者：Shenzhen Envisen Industry Co.Ltd

住所：Block 1, 40 Jianlong Street, Baoan Community, Heng Gang, Long Gang District, Shenzhen, China 518115

国名：中国