

医03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

## タケトラ ニトリル手袋

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

合成ゴムを主材料とし、副材料に打粉を含まない（パウダーフリー）、未滅菌の使い捨て形式の検査・検診用手袋である。

#### 〔主要寸法〕

掌幅：SS 70±10mm、S 80±10mm、M 95±10mm、L 110±10mm  
（ホワイト、ブルー）

全長：240mm以上 及び 290mm以上

厚さ：指部 0.06mm以上、掌部 0.05mm以上

### 【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

### 【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して使用する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意：

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。

#### 2. 重要な基本的注意：

- 薬品や薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認して使用すること。
- 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損やピンホール等）が見られるものは使用しないこと。
- 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
- 複数の患者には使用しないこと。

#### 3. その他の注意：

使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

\*商品に関するお問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-094-315

\*製造業者 Top Quality Glove Sdn. Bhd. F31 (マレーシア)  
山東英科医療製品有限公司 (中国)  
Anhui Intco Medical Products Co., Ltd. (中国)  
Hartalega NGC Sdn. Bhd. (マレーシア)