

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

タケトラ ニトリル手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

合成ゴムを主材料とし、副材料に打粉を含まない（パウダーフリー）、未滅菌の使い捨て形式の検査・検診用手袋である。

[主要寸法]

掌幅: SS 70±10mm, S 80±10mm, M 95±10mm, L 110±10mm
(ホワイト、ブルー)

全長: 240mm以上 及び 290mm以上

厚さ: 指部 0.06mm以上、掌部 0.05mm以上

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して使用する。

【使用上の注意】

- 使用注意:
患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。
- 重要な基本的注意:
 - 薬品や薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認して使用すること。
 - 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損やピンホール等）が見られるものは使用しないこと。
 - 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
 - 複数の患者には使用しないこと。
- その他の注意:
使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

商品に関するお問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-094-315

*製造業者
**
Top Glove Sdn. Bhd. Factory F30 (マレーシア)
Top Quality Glove Sdn. Bhd. F31 (マレーシア)
TERANG NUSA (MALAYSIA) SDN BHD FACTORY40
(マレーシア)
Top Quality Glove Sdn Bhd (マレーシア)
山東英科医療製品有限公司 (中国)
Jiangxi Intco Medical Co., Ltd. (中国)
Anhui Intco Medical Products Co., Ltd. (中国)
Hartalega NGC Sdn. Bhd. (マレーシア)