

\*\*2020年10月(第3版)  
\*2019年6月(第2版)

届出番号 14B3X10016000008

医04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

## タケトラX線造影材入スポンジ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

### 【形状・構造及び原理等】

布(綿100%のガーゼ)を縫い合わせたものであり、白色、青色、緑色がある。  
内部にX線造影材を含むことにより、X線にて検知することができる。  
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

\*\*製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター  
湖北金士達医用産品有限公司(中国)  
(KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd.)

発売元 株式会社 竹虎  
商品に関するお問合せ先 0120-094-315

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。  
X線で検知可能な成分を含有する。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。  
創傷面には滅菌して使用する。

### 【使用上の注意】

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。  
\* 高圧蒸気滅菌を行う場合、130℃以上の高温で滅菌すると、素材の性質上X線造影材が変質する恐れがあります。  
\* 高圧蒸気滅菌の滅菌条件は、115～118℃30分で行うこと。

### 【保管方法及び有効期限等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。