

* 2020年10月 (第2版)
2015年11月作成 (第1版)

届出番号 14B3X10016000011

医05 副木
一般医療機器 単回使用パッド入り副木 35357000

カルメイクⅡ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

【形状・構造及び原理等】

本品は、ポリエチレンフォーム及びアルミ板を2層に張り合わせたものである。

*製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター
湖北金士達医用産品有限公司(中国)
(KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd.)

【使用目的又は効果】

身体の損傷（骨折、捻挫）部位を固定するために用いる。

発売元 株式会社 竹虎
商品に関するお問合せ先 0120-094-315

【使用方法等】

- 規格サイズの選択
 - 固定部位に適切な規格サイズを選択する。
 - 必要に応じ器具にて切断加工することができる。
- 装着方法
 - 本体をペンチなどの器具を用い、治療に最適な固定肢位に変えさせる。
 - ポリエチレンフォーム側を体側面に密着するよう調整する。
 - 本材を医療用の絆創膏や包帯材などで確実に固定する。

【使用上の注意】

- 必要に応じ、本材を切断使用した場合は、その断端部に留意すること。
また、断端が直接皮膚面に接触しないようにすること。
- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 本品に汚損、変形、破損が認められる場合は、使用しないこと。
- 金属物が治療または検査などに悪影響を及ぼすことが予想される場合は、使用を一旦中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。