

* 2020年10月 (第2版)
2015年11月作成 (第1版)

届出番号 14B3X10016000012

医05 副木
一般医療機器 手・指用副木 16210000

ソフラツイスター

【形状・構造及び原理等】

- ・前底部及び後底部・・・人工皮革
- ・鋼鉄線・・・・・・・・鉄
- ・面ファスナー・・・・・・・・ナイロン

【使用目的又は効果】

身体の損傷（骨折、捻挫）部位を固定するために用いる。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に
保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

【使用方法等】

1. 規格サイズの選択
 - ・固定部位に適切な規格サイズを選択する。
2. 装着方法
 - ・必要に応じ、凹面部位を患部側面に密着するよう調整する。
 - ・面ファスナーをもう一方の鋼鉄線に潜らせ、面ファスナー同士を固定に最適な位置で接着させる。
 - ・接着させた後の面ファスナーの余剰がある場合、はさみなどにより切断処理することができる。
 - ・患部側面と本品との接触を軽減させるため、あらかじめ患部を管状包帯などで被覆することができる。

*製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター
湖北金士達医用産品有限公司(中国)
(KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd.)

発売元 株式会社 竹虎
商品に関するお問合せ先 0120-094-315

【使用上の注意】

- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・鋼鉄線部を過度に変形させることによる、強度劣化や破断に留意すること。
- ・面ファスナーをきつく接着した場合、血行障害や皮膚障害を起こす可能性があるため留意すること。
- ・本品に汚損、変形、破損が認められる場合は、使用しないこと。
- ・金属物が治療または検査などに悪影響を及ぼすことが予想される場合は、使用を一旦中止すること。