

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

タケトラ ニトリル手袋B

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

合成ゴムを主材料とし、副材料に打粉を含まない（パウダーフリー）、未滅菌の使い捨て形式の検査・検診用手袋である。

【主要寸法】

掌幅：SS 75±5mm、S 85±5mm、M 95±5mm、L 106±5mm

全長：240mm 以上

厚さ（2層）：指部 0.10mm 以上、掌部 0.10mm 以上、裾部 0.08mm 以上

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意：
患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。
必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。
2. 重要な基本的注意：
 - 1) 薬品や薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので、確認して使用すること。
 - 2) 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損やピンホール等）が見られるものは使用しないこと。
 - 3) 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
 - 4) 複数の患者には使用しないこと。
3. その他の注意：
使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター
Latexx Manufacturing Sdn. Bhd.（マレーシア）

発売元 株式会社 竹虎
商品に関するお問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-094-315