

2020年8月（第1版）

届出番号 14B3X10016000032

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

ポ ー ル メ ン N S

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状、構造及び原理等】

本品は、脱脂した綿繊維を丸めた物に、カルボキシメチルセルロースナトリウム水溶液を噴霧し、適当な長さに裁断したものである。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279 69

製造業者 株式会社 竹虎 東日本物流センター

山九株式会社 大阪支店南港リテール物流センター

Winner Medical (J iayu) Co.,Ltd. (中国)

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 0120-094-315

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊。

【使用方法等】

- ・血液・体液の吸収又は薬剤の塗布等に適宜使用する。
- ・滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。