

ディップエイドプラス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**● 概要**

本品は、固定部位に対して、指関節の遠位および近位に本体より伸びる粘着片を皮膚に接着固定する。

● 形状、構造

本品はポリエチレン発泡体シートにアクリル系粘着剤を塗布し、中心部に不織布製の非粘着性パッドを有する。

● 原理

本品を指関節に対して遠位・近位に巻くことで、屈曲制限する。ポリエチレン発泡体が有するクッション性が、外部からの衝撃を和らげ、患部に対して接触を緩衝する。

囊胞を有する患部の場合、非粘着性パッドによって剥離時の皮膚刺激を緩和する。

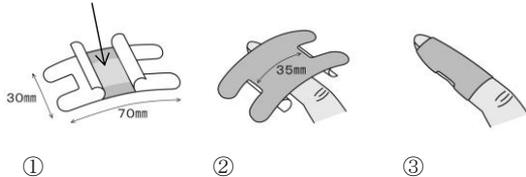
【使用目的又は効果】

身体の損傷部位（指関節）を固定するために用いる。

【使用方法等】**1. 使用方法**

- ① 剥離紙をめくる。
- ② 固定する場所に非粘着部分の中央を位置する。
- ③ 剥離紙をはがして指に巻く。

*非粘着部分（吸収パッドではありません）

**【使用上の注意】**

- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・本品に汚損、変形、破損が認められる場合は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

製造業者 東莞椿田医用包装材料有限公司（中国）
株式会社 竹虎 東日本物流センター
山九株式会社大阪支店南港リテール
物流センター

発売元 株式会社 竹虎

商品に関するお問合せ先 0120-094-315