

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

ポールメンⅡ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

●形状

本品は、脱脂した綿繊維を丸めた物に、カルボキシメチルセルロースナトリウム水溶液を噴霧し、適当な長さに裁断し、エチレンオキサイドガス滅菌したものである。

●材質

セルロース

●原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】

血液・体液の吸収又は薬剤の塗布等に適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・個包装が開封、破損又は汚損している場合は、滅菌品として使用しないこと。
- ・個包装開封後は全量を消費すること。（滅菌状態が保てないため）
- ・個包装開封後、速やかに使用すること。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

使用期限【自己認証（自社データ）による】を、袋及び外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎

神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

商品に関するお問合せ先 0120-094-315