

機械器具 (51) 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 チューブ用クランプ 43223000


TAIRA ローラー鉗子

【禁忌・禁止】

1. 本製品の改造や加工等を行わないこと。
(機器の破損や製品の劣化及び消耗の原因になるため)
2. 本製品を目的以外に使用しないこと。
3. 添付文章をよく読み十分理解すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
全長：180mm

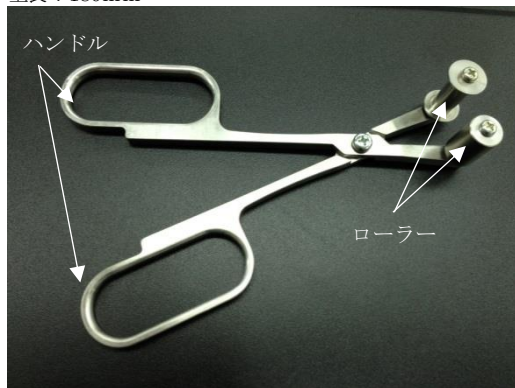

2. 材質：ステンレス鋼
3. 原理

本体部のハンドル部を操作することにより先端部のローラーを開閉する。このローラー部にチューブを挟み圧迫する。

*【使用目的又は効果】

チューブを遮断もしくはつまむことを目的とした器具である。本品は再使用可能である。

*【使用方法等】

1. 手で操作し先端部のローラーでチューブを挟み、チューブに圧力をかけて遮断もしくはつまむ。
2. 滅菌、洗浄を必要に応じて行う。
3. 外観に傷やヒビ等の破損及び異常がないこと。
4. ローラー部がスムーズに回転すること。

【使用上の注意】

本製品のハンドル部分及び先端部分に指、体の一部、その他の機器等を挟まないこと。
(本製品の破損や怪我の危険性があるため)

*【保管方法及び有効期間等】

乾燥している場所で直射日光をさけ、清潔に保管する。

*【保守・点検に係る事項】

1. 使用前の点検事項
 - (1) 本製品は使用前もしくは滅菌前に正常に動作することを確認、点検すること。
 - (2) ネジの緩みや金属疲労による折損は長期使用していない場合でも起こるので、見つけたら使用しないこと。
2. 使用後の点検事項
 - (1) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、本製品を傷つける可能性があるため洗浄等で使用しないこと
 - (2) 洗浄時に分解できる部分は分解し、汚れが落ちやすいように洗浄すること。
 - (3) 本製品に薬品、血液、体液、組織等が付着した場合、直ちに洗浄すること。
 - (4) 洗浄後は腐食をさけるために直ちに乾燥させること。
 - (5) 1 回使用毎に点検をすること。
3. 滅菌
滅菌が必要な場合は 121 度で 30 分の高圧蒸気滅菌か 134 度で 5 分の高圧蒸気滅菌を推奨する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：平電機株式会社
住所：〒411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色 632-8
TEL：055-986-9826 FAX：055-986-9911