

添付文書

平成 30 年 02 月 06 日 (第 1 版)

医療機器製造販売届出番号: 13B1X10264000004

類別: 医療用品 04 整形用品

一般医療機器 一般的名称: 救急絆創膏 JMDN 34864000

単回使用

マチガター

【禁忌・禁止】


- 1 再使用禁止
- 2 再滅菌禁止
- 3 真菌感染等の原因によるもろい爪には使用しないこと。
- 4 異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。
- 5 極端な高温又は低温での使用はしないこと。形状が保たれなくなります。

【形状・構造及び原理等】

< 形状・構造 >

1. 形状

形状は写真のとおりである。材料はシリコンである。

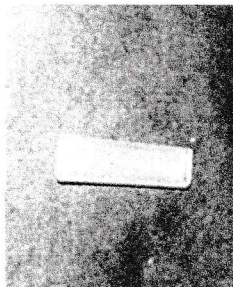

構造材料は U 字型に曲がっている。

原理は爪端に U 字型部を挟み込んで爪及皮膚を保護する。

2. サイズ

横: 25mm
縦: 7mm
厚: 0.7mm

【使用目的、効能又は効果】

本品は陥入爪で皮膚が傷つくのを防ぐ目的で、又創傷部位を保護する目的で使用する。

傷の被覆・保護に効果がある。

【品目仕様等】

外観: 表面にキズ、汚れ、変質部位がなく滑らかであること。

【使用上の注意】異物アレルギーの方への使用はお控

えください。

【使用方法】

(1.使用前)

爪の形に合わせてマチガターの片側を楔型に切ります。

必要に応じて爪部の洗浄、消毒を行う。

(2.使用方法)

マチガターをピンセットで保持し爪と皮膚の間に挿入します。



爪と皮膚の間にてマチガターを入れます。

マチガターの余った部分を切ります。



【貯蔵・保管方法および使用期限等】

1 保管方法

暗所、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2 有効期限

被包の「滅菌使用期限」に表示している。

【包装】

2 ケ / 1 袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕 許可番号 13B1X10264

多摩メディカル有限会社

東京都福生市志茂 213 番地 4 号

連絡先 042-530-2010

〔製造業者〕 登録番号 13BZ200749

多摩メディカル有限会社

東京都福生市志茂 213 番地 4 号