

機械器具39 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001

フットラブルケア鉗子

【形状・構造及び原理等】

9) 洗浄・消毒及び滅菌の際は、可動部分の開放等により
確実に出来るよう配慮してください。

10) 本製品は未滅菌です。使用に際しては必ず洗浄・滅菌を
行ってください。

製造元の推奨する滅菌条件は以下の通り。

滅菌方法	滅菌条件			
	重力置換式		真空脱気式	
	温度	時間	温度	時間
	121度	30分	132度	4分
			134度	3分

【原材料】

ステンレス鋼

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称および住所等】

製造販売業者 合同会社 WSPTジャパン
〒341-0024
埼玉県三郷市三郷1-20-18
TEL 048-954-5636
FAX 048-954-5637

【使用目的又は効果】

本品は足の巻き爪等の手術時における組織の処置、又は把持・圧迫
持ち上げに用いる手術器具である。

【使用方法等】

1. 本製品をご使用になる前に必ず点検を行い、洗浄・滅菌を行ってください。
2. 本品の機能性及び外観に異常がないことを確認して使用する。
3. 開くときは、ハンドル部に指を通し、一旦少し内側に押すようにして、
ストッパーを外す。組織などを挟みそのまま保持するときは、適当な
位置でストッパーを掛けて留める。

【保管方法及び有効期間等】

器具は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない清潔な場所で
保管してください。

【使用上の注意】

1. 塩素系やヨウ素系の消毒剤が付着したときは直ちに水洗いをする。
2. 長時間、器具に血液等を付着させたまま放置しない。
3. 長時間生理食塩水に浸さない。

【保守・点検に係る事項】

1. 動作、機能チェックの実施
日常点検及び使用前点検により、正常な動作や汚れの有無を確認してください。
2. 洗浄・消毒、滅菌
 - 1) 付着した、血液・体液・組織片・薬品等は直ちに洗浄してください。
 - 2) 洗浄剤や消毒剤は、製造業者の取扱説明書に従い、希釈濃度・温度・浸漬
時間等について遵守してください。洗浄剤は中性洗浄剤を推奨します。
 - 3) 超音波洗浄機・ウォッシャー・ディスイنفクター等の洗浄装置で洗浄する
場合は、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に格納して処理してください。
 - 4) クレンザー（磨き粉）や金属ウール等による洗浄は避けてください。
本製品の表面が損傷し、錆や腐食の原因になります。
 - 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨します。
 - 6) 洗浄の際には柔らかい素材のタオル、プラスチック製ブラシ、ウォーターガン
を使用してください。
 - 7) 洗浄後は直ちに乾燥してください。湿った状態で長時間放置する事は避けて
ください。錆や腐食の原因になります。
 - 8) 洗浄後、可動部への手術器具用潤滑剤の塗布を推奨します。錆やかじりを
防ぐことができます。

