

機械器具42 医療用剥離子  
一般医療機器 へら 1364500

## 2wayイングローンファイル

### 【形状・構造及び原理等】

- 本品は巻き爪ケアのカーブを持ち上げる際の逆ピンチとして使用し、薄い形状が巻き爪のサイドウォールに入り込んで持ち上げます。へら状の未滅菌品で、滅菌後剥離等に使用する。

### 2.原材料

ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

本品は足の巻き爪等の手術時における組織の処置、又は付着物の除去に用いる手術器具である。

### 【使用方法等】

- 本品は未滅菌のため、使用前に必ず【保守点検に係る事項】に示す滅菌方法及び滅菌条件にて滅菌を行う。
- 本品の機能性及び外観に異常がないことを確認して使用する。
- 使用後は、【保守点検に係る事項】の手順に従い、点検、洗浄および滅菌を行う。

### 【保管方法及び有効期間等】

滅菌後は、清潔で乾燥した場所に保管すること。(錆び付等の劣化を防止)

### 【保守・点検に係る事項】

- 保守点検に係る注意
  - 本品は未滅菌のため、使用前は、必ずいかに定める方法で滅菌を行うこと。
  - 使用後は、いかに定める方法で洗浄及び滅菌を行い保管すること。
  - 本品の原材料とは異なる金属を使用しているその他の器具と一緒に滅菌しない事
  - 強酸性、又は7アルカリ性の洗剤を使用すると本品が変色する恐れがあるため、中性洗剤の使用を推奨する。
  - 滅菌温度は137度を超えない事。
- 洗浄
  - 使用後、直ぐに流水で付着している血液、体液、組織片等を洗い流す。
  - 洗浄しがたい部分は、酸素系の中性洗剤に侵漬させ、柔毛ブラシ等を使用して洗浄し、洗い残しがないように注意する。
  - 酵素系の中性洗剤を用いて、ウォッシャーディスインフェクター又は超音波洗浄機で洗浄を行う。
  - 精製水でよく濯ぐ。(洗浄液が残留したままだと、滅菌後、染みになる恐れあり)
  - 清潔な柔らかい布で水分を拭き取る。

### 3.滅菌

製造元の推奨する滅菌条件は以下の通り。

滅菌方法 高圧蒸気滅菌

重力置換式 真空脱気式

滅菌条件	温度	121度	132度	134度
	時間	30分		4分

### 【製造販売業者および製造業者の氏名または名称および住所等】

製造販売業者 合同会社 WSPTジャパン  
〒341-0024  
埼玉県三郷市三郷1-20-18  
TEL 048-954-5636  
FAX 048-954-5637