

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ 16184000

プロフィーカップ

【禁忌・禁止】

〈適用対象(患者)〉

・本品のカップ及びコーンに使用されている材質(天然ゴム)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

・本品に使用されている材質(ニッケル)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

〈使用方法〉

・本品のカップ及びコーンに使用されている材質(天然ゴム)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。

・本品に使用されている材質(ニッケル)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

(1)形状

本品にはCAタイプ、スクリュータイプがある。

(2)原材料

天然ゴム

軸部 :真鍮(ニッケルめっき)

(3)構造

名称	形状
リップ スクリュータイプ	
ウェブ スクリュータイプ	
ポイント スクリュータイプ	
ウェブショート スクリュータイプ	
ターボ スクリュータイプ	
ターボ スクリュータイプ ホワイト	
ターボプラス スクリュータイプ	
ターボプラス スクリュータイプ ホワイト	

(4)原理

研磨剤を塗布した本品を歯科用ハンドピースに取り付けて回転させることによって、歯面を清掃・研磨する。

【使用目的又は効果】

歯面等の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1.清掃もしくは研磨する部位に適したカップを選択する。

2.CAタイプを使用する場合は、ハンドピースに直接取り付ける。スクリュータイプを使用する場合は、ハンドピースに直接取り付けるか、スクリュータイプ用マンドレールに装着した後、ハンドピースに取り付ける。

3.カップに研磨剤を付ける。

4.ハンドピースを回転させて、歯面を清掃・研磨する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- CAタイプ、もしくは専用のマンドレールを使用する場合は、ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- スクリュータイプをハンドピースに直接取り付けて使用する場合は、確実に奥までスクリューを締め、動かないことを確認すること。
- 予め口腔外で回転させて振れないことを確認して使用すること。
- スクリュータイプを使用する場合は、モーターは必ず正(右)回転で使用すること。[モーターを逆(左)回転させると、スクリューが緩み、本品が外れてしまうため。]
- 2,000rpmを超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあるため、このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談するなど適切な措置を施すこと。
- 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。
- 保護メガネ、マスク等を使用すること。[目の損傷、飛沫感染を防ぐため。]

【保管方法及び有効期間等】

【保管の条件】

- スクリュータイプ用マンドレールは、洗浄、消毒、滅菌後に水分を除去し、十分乾かしてから保管すること。
- もらい錆を防ぐため、錆びた器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

【洗浄・滅菌】(スクリュータイプ用マンドレール)

- 洗浄には、精製水、歯科用防錆材を使用すること。
- 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件(日本薬局方による):115~118° C 30分間
112~124° C 15分間
126~129° C 10分間
- 135°C以上に加熱しないこと。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 合同会社 WSPTジャパン

〒341-0024

埼玉県三郷市三郷1-20-18

TEL 048-954-5636

FAX 048-954-5637