

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カブ 16184000

プロフィーブラシ

【禁忌・禁止】

・ニッケルに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、患者には使用しないこと。
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

名称	形状	材質
ホワイトスタンダード スクリュータイプ		ナイロン、真鍮 (ニッケルめっき)
ブラックスタンダード スクリュータイプ		ナイロン、真鍮 (ニッケルめっき)
ブラックスタンダード ミゼット スクリュータイプ		ナイロン、真鍮 (ニッケルめっき)
ブラックポイントスタンダード スクリュータイプ		ナイロン、真鍮 (ニッケルめっき)
ブラックポイントミゼット スクリュータイプ		ナイロン、真鍮 (ニッケルめっき)
ブラックスタンダード ラッチタイプ		天然毛(豚)、 真鍮(ニッケルめっき)

原理

本品はブラシの形状の異なる2種類の製品から構成される。歯科用ハンドピースに装着し、回転させて歯面を研磨、清掃をする。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科衛生士及び歯科医師が歯の清掃と研磨に用いるブラシを備えた回転式歯科用器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨剤を適用する。

【使用方法等】

1. 研磨部位に応じてプロフィーブラシを選択する。
2. 歯科用ハンドピースに装着する。
3. プロフィーブラシに十分な研磨用ペーストを付ける。
4. 歯面に対して継続的に軽く押し当てて研磨する。

歯科用ハンドピースでの推奨回転数(rpm)は下記のとおりである。

適正回転数先端部800rpm～1,200rpm

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 1. 再使用禁止
 2. 本品は記載の目的のみに使用すること。
 3. ハンドピースのねじ山がスクリューに適合しない場合は装着しないこと。
 4. スクリューを装着する際は、ハンドピースを作用させずに手で回して装着すること。
 5. 予め患者の口腔外で回転させて、スクリューがハンドピースに確実に固定されていることを確認してから使用すること。
 6. 必ず正回転(時計回り方向)で使用すること。(逆回転させるとスクリューが外れてしまいます)
 7. 使用回転数を超えた使用は、破損してけがをする恐れがあるので、使用回転数を守ること。
 8. 本品は変形あるいは破損し、口腔内を傷つける恐れがあるため、無理な角度、逆の加圧で使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 1. 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
 2. 感染を予防するために必ず保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散したペーストなどから眼・口・鼻等を保護すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者: 合同会社 WSPTジャパン

〒341-0024

埼玉県三郷市三郷1-20-18

TEL 048-954-5636 FAX 048-954-5637