

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード:31776000

電動マジックミラー

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるので、
本品の原材料に対して金属アレルギーの既往症のある患者には使用
しないこと。

【形状・構造及び原理等】

(1)種類

ミラートップ
バッテリー

(2)原材料

ステンレス鋼

(3)構造

本品はステンレス鋼を作業部と軸部とに一体成型し、軸部下部に
バッテリーを装着したものである

(4)原理

ミラー部分を高速回転させることでスプレー水や汚れを飛ばします。

【使用目的又は効果】

口腔内検査、圧排、破折ファイル除去、窩洞形成、超音波スケリングのために
用いるミラーヘッド及びバッテリーを装着したハンドルから成る歯科用器具

【使用方法等】

付属の充電器で充電したイオンリチウムバッテリーをハンドルに装着し、
14,000rpmの高速回転によりスプレー水や汚れを飛ばしながら術野を
見やすくして使用する。

【使用上の注意】

【禁忌・禁止】事項に従うこと。

1.使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼ
トニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水(超酸性水)等の機能水、家庭用
洗剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。
- ④使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、
直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ⑤洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ⑥薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。
薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する
洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。特に長期間の浸漬は避けること。
- ⑦消毒を行う時は、グルタール製剤は使用しないこと。
- ⑧洗浄、消毒、滅菌には精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオン
の影響で鏡面曇りや金属腐食を起こすことがある。
- ⑨加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器など)の乾燥温度は135℃とし、バッテリー部を
外した上部のみの滅菌とすること。高温での乾燥により変質、変色及び鏡面曇り
が生じることがある。
- ⑩洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。
水分が付着した状態で長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- ⑪EOGガス滅菌により鏡面の曇りを生じることがある。
- ⑫腐食及び錆びの原因となるので、洗浄の際のクレンザー(磨き粉)や金属
ウール、金ブラシを使用しないこと。
- ⑬超音波洗浄器での洗浄により鏡面が剥離することがあるので、使用しないこと。

2.重要な基本的注意

本品の使用により、感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるので
異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせるこ

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(保管方法)

- ①保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後は必ず乾燥させ
ること。
- ②「もらい錆び」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。
また、化学薬品と一緒に保管・収納しないこと。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること

【保守・点検に関する事項】

使用前・使用後には以下の点検を行うこと

- ① 鏡面のキズ、ヒビ、破損がないこと。
 - ②歯鏡全体にキズや腐食がないこと。
 - ③接合部に錆びや剥離がないこと。
- 上記の様な異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【包装】

ハンドピース、バッテリー×2、両面交換用ミラー×6
マグネット式ミラー交換器、充電器、アダプター、交換用ノンスリップ
ローター交換工具、メンテナンスオイル入れ

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 合同会社 WSPTジャパン
〒341-0024
埼玉県三郷市三郷1-20-18
TEL 048-954-5636
FAX 048-954-5637