

2016.12. 1 作成
2017.10(新様式)

届出番号 13B3X10207000001

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

サンケイコットンホイールレーズ用



【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて
汚染等を受けないように保管して下さい

【包装】

1 個入り

【形状、構造及び原理】

ホイール状 綿
レーズにセットし回転させて使用
円形（直径 80 ミリ、厚み 10 ミリ）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 多賀谷製作所
製造業者 多賀谷製作所
03-3893-2470

【使用目的又は効果】

歯科用金属及びレジン床、スルフォン床等の仕上げ、艶だしに用いる

【使用方法等】

レーズに固定し、必ず使用目的に合った研磨剤
をつけて中速回転以下で御使用下さい。

【使用上の注意】

レーズにしっかりとセットして下さい
作業中はマスク、フェイスガード等御着用下さい。
初期使用時、裁断面の弱い綿片が多少飛びますが異常では有りません。（一度綿片が吹き飛ぶ事により、本来の研磨性能が出ます）
研磨剤を必ず付けて御使用下さい