

2016.12. 1 作成
2017.10(新様式)

届出番号 13B3X10207000005

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ハッピーフェルトホイールレーズ用



【包装】

1 個入り

【形状・構造及び原理】

ホイール状 羊毛

レーズにセットし回転させて使用

円形（直径 55 ミリ・厚み 10 ミリ）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【使用目的又は効果】

歯科用金属、レジン等の研磨に用いる。

製造販売業者 多賀谷製作所

製造業者 多賀谷製作所

03-3893-2470

【使用方法等】

レーズに固定し、必ず使用目的に合った研磨剤
をつけて中速回転以下で御使用下さい。

【使用上の注意】

レーズにしっかりとセットして下さい

作業中はマスク、フェイスガード等御着用
下さい。

研磨剤を必ず付けて御使用下さい

【保管方法及び有効期間等】

水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて
汚染等を受けないように保管して下さい