

2016.12. 1 作成  
2017.10(新様式)

届出番号 13B3X10207000007

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

### サンケイクロスホイールレーズ用

---



#### 【形状・構造及び原理】

ホイール状 綿  
レーズにセットし回転させて使用  
(直径 90 ミリ・厚み 10 ミリ)  
ソフト、ハード有り

#### 【使用目的又は効果】

歯科用金属及びレジン床、スルフォン床等の仕上げ、艶だしに用いる

#### 【使用方法等】

レーズに固定し、必ず使用目的に合った研磨剤をつけて中速回転以下で御使用下さい。

#### 【使用上の注意】

レーズにしっかりとセットして下さい  
作業中はマスク、フェイスガード等御着用下さい。  
初期使用時、裁断面の弱い綿片が多少飛びますが異常では有りません。(一度綿片が吹き飛ぶ事により、本来の研磨性能が出ます)  
研磨剤を必ず付けて御使用下さい。

#### 【保管方法及び有効期間等】

水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて汚染等を受けないように保管して下さい

#### 【包装】

1 個入り

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 多賀谷製作所  
製造業者 多賀谷製作所  
03-3893-2470