

2016.12.1 作成
2017.10(新様式)

届出番号 13B3X10207000009

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000

ハッピーポリッシングブラシ CA 用



無理な角度、過度の加圧はお避け下さい。
オートクレープ不可。
一度だけのご使用にして下さい。

【保管方法及び有効期間】

水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて
汚染等を受けないように保管して下さい

【形状・構造及び原理】

ブラシ部分 豚毛(黒、白)フラット
バー部分 真鍮(ニッケル鍍金)

【包装】

1:6 個入り(黒、白共)

【使用目的又は効果】

歯面(表面)の清掃、研磨に用いる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【使用方法】

薬液等で洗浄、殺菌してお使い下さい。
オートクレープ等高圧乾熱殺菌不可。
コントラに固定し、ポリッシング用ペーストを付けて
3,000 回転以下で御使用下さい。
ペースト、薬液については取扱メーカーにご確認
下さい。

製造販売業者 多賀谷製作所
製造業者 多賀谷製作所
03-3893-2470

【使用上の注意】

使用前にコントラのラッチにしっかり装着できているか確認して下さい。
使用回転数は 3,000 以下です。
ブラシ回転中に異音がある場合はすぐに使用を
中止して下さい。