


2016.12. 1 作成
2017.10(新様式)

届出番号 13B3X10207000011

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

サンケイサイザルホイールレーズ用

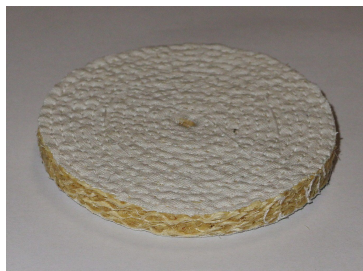

【形状・構造及び原理】

ホイール状 サイザル、綿糸
レーズにセットし回転させて使用
(直径 80 ミリ・厚み 7 ミリ)

【使用目的又は効果】

歯科用金属及びレジン等の研磨に用いる。

【使用方法等】

レーズに固定し、必ず使用目的に合った研磨剤
をつけて中速回転以下で御使用下さい。

【使用上の注意】

レーズにしっかりとセットして下さい
作業中はマスク、フェイスガード等御着用下さい。
初期使用時、裁断面の弱い麻片が多少飛びます
が異常では有りません。(一度麻片が吹き飛ぶ事
により、本来の研磨性能が出ます)
研磨剤を必ず付けて御使用下さい

【保管方法及び有効期間等】

水分・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて
汚染等を受けないように保管して下さい

【包装】

1 個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 多賀谷製作所
製造業者 多賀谷製作所
03-3893-2470