

2022年12月作成（第三版）

届出番号：13B3X10269000005

医療用品04 整形用品

一般医療機器 歯科用咬合スプリント 36311000 (JMDNコード)

デンタルマウスピース

【形状・構造】

- ①本品は、マウスピース型のインスタントスプリントである。
- ②本品は、EVE樹脂により形成されている。

【使用目的・効能又は効果】

本品は、転移歯又は動揺歯の位置の保持、クレンチング（噛みしめ癖）や歯ぎしりとその後遺症の治療、及び筋肉又は顎関節の疼痛、縦おぼ顎関節症に対する暫間的な除痛に使用する。

【操作方法又は使用方法】

- 1.本品を包装の袋から取り出し、洗浄する。
- 2.本品を口腔内に装着する。
- 3.使用後は洗浄し保管する。

【使用上の注意】

- 1.口腔内に装着した際、歯茎や軟組織に当たって、痛みや不快感を生じた場合は使用を控える。
- 2.装着後30日間を使用期間とし、これを超えて長期にわたって装着しないようにする。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管上の注意：常温常湿で保管すること。
使用期間：開封後30日間

【包装】

1個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売業者）

法人名：武内製薬株式会社

住所：東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル

許可番号：13B3X10269

（販売業者）

法人名：株式会社フロントフィールド

住所：広島県廿日市市木材港南3-39

TEL：0829-30-7453

製造
番号