

歯 08 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用咬合堤ワックス (JMDN 38602000)

DIO Probo- ワックスデンチャー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

[有効期間]

外箱の表示に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社ダブリューエスエム

住所 石川県金沢市高尾南 2-33-101

e-mail : wsmcert@wsmcert.com

製造業者:

DIO コーポレーション

DIO Corporation (大韓民国)

【形状・構造及び原理等】

上顎用



下顎用



〔材料〕パラフィン

【使用目的又は効果】

本品は、上下顎関係を記録するために用いる模型用ワックスであり、咬合堤を作る。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

使用前に消毒液で 5 分間処理を行う。

2. 使用方法

- 1) 本品をお湯(40～50℃)に約 10 秒間浸して柔らかくする。
- 2) 手術用手袋*を着用しながら患者の口に入れ、内側が患者の歯肉に合うように位置を調整する。
- 3) 必要に応じて本品の内側に印象材*を加え調整する。
- 4) 本品を歯と連動させて咬合を調整し、口から取り除く。
- 5) 本品の内面と外面をスキャンする。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 60℃以上の温度で作業すると火傷をする可能性があります。
- 2) 沸騰するときは手袋を着用してください。
- 3) 医師の処方なしに製品を設計または変更しないでください。
- 4) 製品にアレルギー反応がある場合は、使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 5) 製品の形状を維持するために、過度の衝撃や圧力を加えないでください。
- 6) 損傷または落下した場合、この製品を使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温で保管する。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい