

## スマートベンチレータ Vivo 45 / スマートベンチレータ Vivo 45LS の付属品\* エフォートベルト

### 【禁忌・禁止】

#### 【禁忌・禁止】

##### <使用方法>

1. 本装置を磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）環境で使用しないこと。
2. 本装置を可燃性ガスまたはその他の可燃性麻酔ガス雰囲気内で使用しないこと。[爆発または火災を引き起こす恐れがあるため]
3. 本装置を高気圧酸素治療用タンク内で使用しないこと。[爆発または火災を引き起こす恐れがあるため]
4. 無呼吸モニタまたは生命維持の状況下で使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### [形状]

エフォートベルト



エフォートベルト接続ボックス



エフォートベルト・ワイヤセット



#### [使用環境]

温度：5～40℃

湿度：15～95%（結露のないこと）

### 【使用目的又は効果】

腹呼吸及び胸呼吸の動きを検出する。

### 【使用方法等】

装置本体の取扱説明書を参照すること。

### 【使用上の注意】

#### <基本的な注意事項>

- ・装置本体の取扱説明書を参照すること。
- ・取付及び接続は確実に行うこと。
- ・エフォートベルトとリモートスタート/ストップは併用できない。

### 【保管方法及び有効期間等】

耐用期間

ボックス/ワイヤセット 8年[自己認証（社内データ）による]

保管環境

温度：-20～60℃

湿度：15～95%（結露のないこと）

### 【保守・点検に係る事項】

#### [使用者による保守点検事項]

- ・エフォートベルトは、ぬるま湯と家庭用洗濯洗剤で洗い、自然乾燥させる。
- ・エフォートベルト・ワイヤセットは、石鹼水、漂白剤またはアルコールを含んだウェットティッシュで拭くこと。液体に浸さないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：チェスト株式会社

TEL：03-3813-7200

製造業者：Breas Medical AB

スウェーデン