

機械器具 06 呼吸補助器 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
成人用人工呼吸器 (JMDNコード: 42411000)

スマートベンチレータ Vivo 50 / スマートベンチレータ Vivo 60 / スマートベンチレータ Vivo 65 の付属品

汎用人工呼吸器 (JMDNコード: 70561000)
スマートベンチレータ Vivo 45LS の付属品*

再使用禁止

マウスピースインターフェース付呼吸管


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止 [本品は単回使用製品のため]

【形状・構造及び原理等】


[形状]

①MPV用バクテリアフィルター

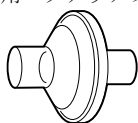


<材質>
不織布: ポリプロピレン樹脂
筐体: ABS樹脂

②MPV用15mm呼吸回路 (1.6m)

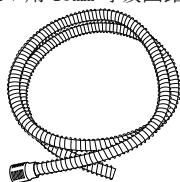

<材質>
ポリ塩化ビニル樹脂

③MPV用ストレートコネクタ (22F-15M)

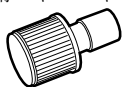


<材質>
スチレン-ブタジエン共重合体

④MPV用回路固定リング




<材質>
シリコーンゴム

⑤MPV用マウスピース

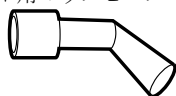

<材質>
ポリプロピレン樹脂

⑥MPV用ストレートコネクタ

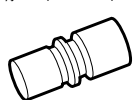

<材質>
ポリ塩化ビニル樹脂

【使用目的又は効果】

装置本体の取扱説明書、添付文書を参照すること。

【使用方法等】

装置本体の取扱説明書を参照すること。

* 【使用上の注意】

<基本的な注意事項>

- ・本品はスマートベンチレータ Vivo 50 / Vivo 60 / Vivo 65 / Vivo 45LSに接続し使用すること。

- ・使用する前に呼吸管及び装置本体の取扱説明書及び添付文書を読み、内容を充分理解して使用すること。
- ・異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・直射日光が当たる場所には置かないこと。
- ・包装に損傷又は異常が認められた場合には使用しないでください。
- ・本品は一人の患者のみに使用してください。
- ・本品は、最大7日間の使用を意図しています。
- ・本品や機器を毛布等で覆わないでください。
- ・本品を引っ張って伸ばさないでください。
- ・本品は再使用禁止のため、洗ったり、滅菌したりしないでください。
- ・本品のチューブを押しつぶさないでください。
- ・廃棄する場合は地域の環境規制に従い行うこと。

** 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・直射日光の当たる場所で保管しないこと。
- ・ほこり等のない場所に保管すること。

<推奨使用期間>

- ・7日間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: チェスト株式会社
TEL: 03-3813-7200

製造業者: Breas Medical AB
スウェーデン

装置本体の取扱説明書、添付文書を必ず参照してください