

機械器具 06 呼吸補助器
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器汎用人工呼吸器 (JMDN コード: 70561000)
**スマートベンチレータ Vivo 45 / スマートベンチレータ Vivo 45LS /
NIP ネーザル Vivo45 の付属品 */****

再使用禁止

シングルリム用 15 mmヒータワイヤ(ディスポーザブル)

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品の使用前、使用中及び使用後には適切な点検を行うこと。
- ・点検や使用中に異常が認められたときは使用を中止し、適切な処置を行うこと。[患者の安全確保のため]


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: チェスト株式会社
TEL: 03-3813-7200

製造業者: Breas Medical AB
スウェーデン

【形状・構造及び原理等】

[形状]

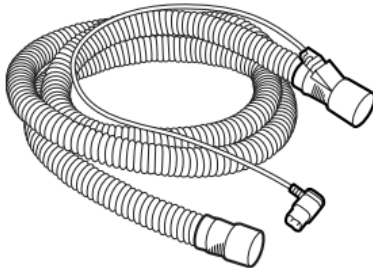

[使用環境]

温度: 5~40℃
湿度: 15~95%

【使用目的又は効果】

呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いること。

【使用方法等】

本品及び装置本体の取扱説明書、添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

- ・複数の患者に使用しないこと。
- ・本品の取り外しに際しては、ホース部を持って引っ張るなど無理な力をかけないこと。
- ・異常が認められる場合は使用を中止し、使用禁止など適切な表示をすること。
- ・ヒーターケーブルは必ずコネクタを持って取外すこと。
- ・滅菌しないこと。
- ・呼吸管の外側から加温したり、カバーや毛布などで呼吸管を覆わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

使用期間 12ヶ月
耐用期間(保管期間) ラベル参照

保管環境

温度: -20~60℃
湿度: 15~95%

【保守・点検に係る事項】

- ・強力石鹼、洗剤、溶剤、アルコールを使用しないこと。
- ・食洗機で洗わないこと。
- ・洗浄後は、完全に乾燥するまで使用しないこと。

取扱説明書を必ず参照してください