



再使用禁止

## 汎用呼吸弁アッセンブリ CHE-SH1-2

**【禁忌・禁止】**  
・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

[形状]

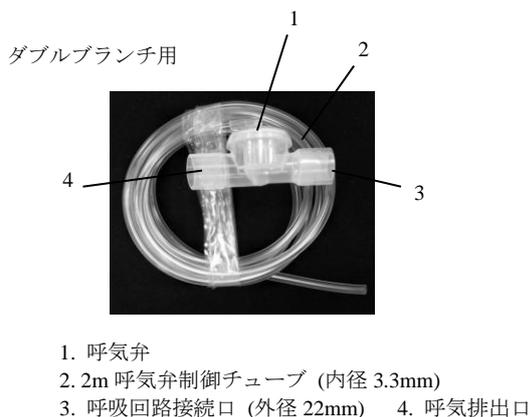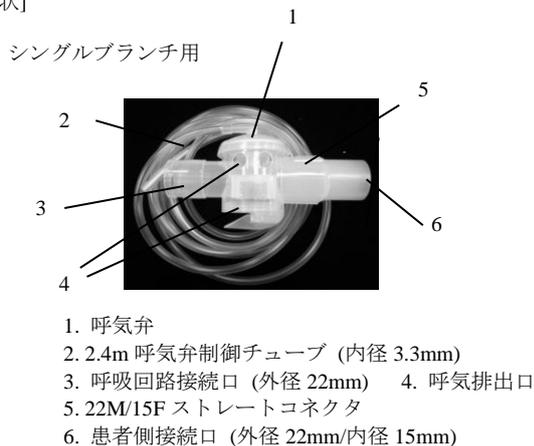

[原理]

人工呼吸器と接続した呼吸弁制御チューブから送られてくるガス圧に合わせ弁が開放し、呼吸回路の外へ呼吸排出口から患者の呼吸を排出する。


### 【使用目的又は効果】

呼吸回路、気管切開チューブ、フェースマスク、他の呼吸回路コンポーネントに接続し、患者の呼吸に合わせて回路から呼吸を排出する。


### 【使用方法等】

- 呼吸回路\*を本品の呼吸器回路接続口に接続する。シングルブランチの場合はマスク等\*を患者側接続口に接続する。
- 呼吸弁制御チューブを人工呼吸器\*の圧ライン接続口に接続する。
- 患者に使用する前に、すべての接続部 (アクセサリも含めて) が、使用中に緩まないようにしっかり接続されていることを確認する。
- 使用準備が出来たら呼吸回路をテストラングおよび人工呼吸器\*に接続して回路に空気を流し、漏れなどがなく正常に作動することを確認する。

(シングルブランチ用)

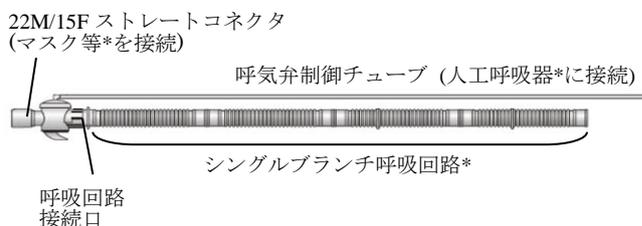

(ダブルブランチ用)

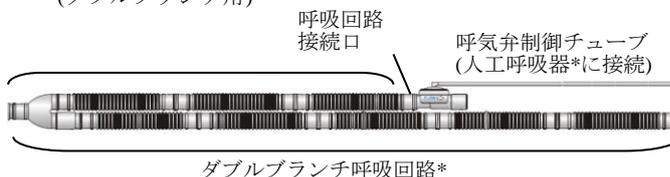

\*併用医療機器

呼吸回路: ISO 5367 及び ISO 5356-1 適合品を使用すること。  
マスク: ISO 5356-1 適合品を使用すること。

### 【使用上の注意】

- 衣類や布団等で、呼吸弁の呼吸排出口を塞がないように注意確認すること。[窒息するおそれがあるため。]
- 使用前に併用機器の取扱説明書に従いインターフェースをテストし、モニタ上で確認すること。
- 使用後は廃棄すること。本品は単回使用であり、再使用しないこと。[感染や品質低下の恐れがあるため]
- 水に浸したり、洗浄したり、ガスや蒸気により滅菌しないこと。[有害なガスが残留したり、呼吸抵抗増加の恐れがあるため]
- 訓練を受け認定された者が使用すること。

\*【保管方法及び有効期間等】

[耐用期間]

(保管期限) 製造後3年 [自己認証 (当社データ) による]

[保管環境]

温度: -20°C ~ 60°C

湿度: <85%

- 乾燥した涼しい場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: チェスト株式会社

TEL: 03-3813-7200

製造業者: Hsiner Co., Ltd.

台湾

併用機器の取扱説明書を必ず参照してください