


機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ (JMDN コード: 34838012)

再使用禁止

汎用リークポートアッセンブリ CHE-SK-1

【禁忌・禁止】
・再使用禁止**【形状・構造及び原理等】**

[形状]

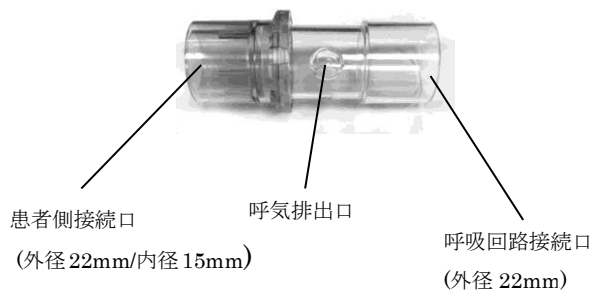

[原理]


JIS T 7201-2-1 に適合したコネクタを具備したマスクや呼吸回路等と接続し、呼気排出口から呼吸回路の外へ患者の呼気を排出する。

【使用目的又は効果】

呼吸回路、気管切開チューブ、フェースマスク、他の呼吸回路コンポーネントに接続し、患者の呼気を排出する。

【使用方法等】

1. 呼吸回路*を本品の呼吸器回路接続口に接続し、テストラングおよびマスク等*を患者側接続口に接続する。
2. 患者に使用する前に、すべての接続部 (アクセサリも含めて) が、使用中に緩まないようにしっかり接続されていることを確認する。
3. 使用準備が出来たら呼吸回路を人工呼吸器*に接続して回路に空気を流し、正常に作動することを確認する。
4. 使用前にテストラングを外す。

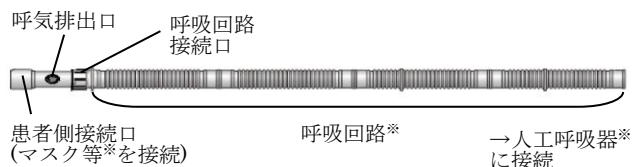

*併用医療機器

呼吸回路: ISO 5367 及び ISO 5356-1 適合品を使用すること。
マスク等: ISO 5356-1 適合品を使用すること。

【使用上の注意】

- ・衣類や布団等で、呼気排出口を塞がないように注意確認すること。[窒息するおそれがあるため。]
- ・使用前に併用機器の取扱説明書に従いインターフェースをテストし、モニタ上で確認すること。
- ・使用後は廃棄すること。本品は単回使用であり、再使用しないこと。[感染や品質低下の恐れがあるため]
- ・水に浸したり、洗浄したり、ガスや蒸気により滅菌しない

こと。[有害なガスが残留したり、呼吸抵抗増加の恐れがあるため]

- ・訓練を受け認定された者が使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[耐用期間]

(保管期限) 製造後 5 年 [自己認証 (当社データ) による]

[保管環境]

温度: -20℃～60℃

湿度: <85%

- ・乾燥した涼しい場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: チェスト株式会社

TEL: 03-3813-7200

製造業者: Hsiner Co., Ltd.
台湾

併用機器の取扱説明書を必ず参照してください