

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 酸素供給用経鼻カニューレ (JMDNコード: 35201000)

再使用禁止

GGM ネーザルカニューレ

【警告】

<使用方法>

- ・本品の使用中は患者の状態を常にモニターし、閉塞、漏れ等に注意すること。[呼吸停止のおそれ]

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止。[本品は単回使用製品のため]
- ・本品の周囲では火気を避けること。[爆発や火災のおそれ]
- ・加温加湿器なしで使用しないこと。[患者気道の損傷のおそれ]

【形状・構造及び原理等】

形状

新生児用、乳児用



小児用、小児/成人用、成人用



原理

呼吸回路を介し酸素供給装置及び加温加湿器/加熱式加湿器に接続し、両外鼻孔経由で患者に酸素を供給する。

製品	構成品	素材
新生児用 乳児用	インターフェイス	シリコーン
	チューブ	非フタル酸ポリ塩化ビニル
	接着テープ	ハイドロコロイド
小児用 小児/成人用 成人用	インターフェイス	シリコーン
	チューブ	EVA樹脂
	ヘッドバンド	ナイロン
	ネックストラップ	ナイロン

【使用目的又は効果】

経鼻的に酸素ガスを投与する。

【使用方法等】

新生児用、乳児用

1. 本品の呼吸回路接続口と装置等に接続されている呼吸回路*を接続する。
2. 接着テープをインターフェイスに接続し、テープの紙を外しインターフェイスを両鼻孔の位置に合わせる。
3. チューブを耳に掛け、ストッパーリングでインターフェイスを固定する。
4. 使用後は呼吸回路*より取り外す。

小児用、小児/成人用、成人用

1. ネックストラップを首に掛ける。
2. インターフェイスを両鼻孔に装着し、ヘッドバンドで固定する。
3. 本品の呼吸回路接続口と装置等に接続されている呼吸回路*を接続する。
4. 使用後は呼吸回路*より取り外す。

*併用医療機器: ISO 5367 及び ISO 5356-1 適合品を使用すること。

【使用上の注意】

- ・医師又は医師の指示により使用されること。
- ・使用前に本添付文書及び併用機器の取扱説明書をよく読むこと。
- ・本品を使用する前には、部品に異常がないことを確認し、異常があった場合には使用しないこと。
- ・推奨される使用期間は 14 日間であるが、使用状況により異なるため、使用の際は適宜部品に損傷がないか確認し、損傷や変化が見られた場合には速やかに交換すること。
- ・使用前に接続部に外れがないか確認すること。
- ・本品の使用により患者の鼻腔部やテープ固定部の皮膚等に損傷や発赤が生じていないことを定期的に確認すること。
- ・接着テープに変色が見られたら交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

[耐用期間]

(保管期限) 製造後 3 年 [自己認証 (当社データ) による]

[保管環境]

温度: 10°C~30°C (新生児用、乳児用)
-10°C -50°C (小児用、小児/成人用、成人用)
湿度: 30%~95%

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: チェスト株式会社
TEL: 03-3813-7200

製造業者: Great Group Medical Co., Ltd.
台湾

取扱説明書を必ず参照してください