

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000
シャイニングスリーディー DS-EX

【禁止】

本品を、歯科修復物の設計以外の目的で使用しないでください。

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造



2. 仕様

カメラ解像度	1.3 メガピクセル
スキャン領域	100×100×75 (mm)
スキャン精度	<15 μ
スキャン時間	バイト約 13 秒、上/下顎約 30 秒、1-8dies 約 30 秒、印象約 120 秒
サイズ	260×270×420 (mm)
重量	5kg
アウトプットフォーマット	STL, OBJ
インターフェース	USB3.0
電源	DC 24V

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科修復物のコンピュータ支援設計に用いる。

【使用方法等】

1) 使用前の準備

- ソフトウェアパッケージの解凍をする
- 本体を PC に接続し、電源を入れる。
- ソフトウェアパッケージの起動。
- 本品のキャリブレーションを行う。

2) 使用中の操作

- 測定する模型を固定して設置する。
- ソフトウェアで模型を 3 次元的に取り込む。
- 取り込み後に模型を取り出す。

3) 使用後の処置

専用ソフトウェアを終了し、パソコン、スキャナー本体の電源を切る。

【使用上の注意】

- 10℃から 30℃の室温内での使用を推奨。

【取り扱い上の注意】

- 0℃から 30℃の室温内にて保管を推奨。
- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
- 傾斜・振動・衝撃など安定状態に注意して保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 機器及び部品は、トレーニングを受けた者が必ず定期的保守点検を行うこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に動作することを確認すること。

【包装】

1 式 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

氏名又は名称

C B C 株式会社

第二種医療機器製造販売業

東京都中央区月島 2 丁目 15 番 13 号

1 3 B 2 X 0 0 0 7 8

Tel. 03-3536-4653

緊急連絡先

C B C 株式会社

東京都中央区月島 2 丁目 15 番 13 号

Tel. 03-3536-4653

Fax. 03-3536-4786

【海外の製造所の氏名又は名称及び住所等】

Shining 3D Tech Co., Ltd.

中華人民共和国