

2015年1月(第2版)

届出番号 08B3X00007000000

2008年10月1日(第1版)

歯科材料 8 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

ハーモニーワックス

【形状・構造等】

下記成分により構成される。

1. 形状

インゴット状

2. 成分

パラフィンワックス、カルナバロウワック、その他

【製造業者または輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 チョーワ株式会社

住所 〒316-0002

茨城県日立市桜川町3丁目9番10号

電話番号 0294-32-2581

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

歯科インレー—鑄造用ワックス

融点 : 60度

2. 使用目的

インレー、クラウン、形成用

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 固形のまま加熱したインスツルメントで、熔かし取り築成するか、ワックスバス等で溶解し、築成して下さい。
- 2) 石膏模型からの離型性を良くする為、必ず分離材を使用してください。
- 3) 記載の用途以外には使用しないこと。
- 4) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

加熱したワックスを皮膚等に付けないよう注意してお取り扱い下さい。万が一やけどした場合は、速やかに薬を塗布し、専門医に見せてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 直射日光に直接あたる場所に長期間放置すると、脱色する可能性があります。
- 3) 開封後に保管する場合は、缶等の光を遮断する容器に保管してください。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 5) 溶融状態を長時間続けると、変色する場合があります。

2. 使用期限

特に定めません。

【包装】

60g缶入及び500g板状箱入り