

2015年1月(第2版)

2008年10月1日(第1版)

歯科材料 8 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

センチュリーワックス

【形状・構造等】

下記成分により構成される。

1. 形状

インゴット状

2. 成分

パラフィンワックス、カルナバロウワック、その他

2. 使用期限

特に定めません。

【包装】

50g缶入り、300gケース入り

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

歯科インレー鑄造用ワックス

融点 : 61度

2. 使用目的

インレー、クラウン、形成用

製造・販売元

チヨウワ株式会社

住所

〒316-0002

茨城県日立市桜川町3丁目9番10号

電話番号

0294-32-2581

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 固形の状態で加熱したインスツルメントで、溶かし
とって築成してください。
- 2) 石膏模型からの離型性を良くする為、必ず分離材を
使用してください。
- 3) 記載の用途以外には使用しないこと。
- 4) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- 1) 加熱したワックスを皮膚等に付けないよう注意して
お取り扱い下さい。万が一やけどした場合は、速や
かに薬を塗布し、専門医に診せてください。
- 2) ワックスバス等で長時間溶融状態におくと、色素分
離しますので、ご注意下さい。(不透明色のみ)

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 直射日光に直接あたる場所に長期間放置すると、脱
色する可能性があります。
- 3) 開封後に保管する場合は、缶等の光を遮断する容器
に保管してください。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理
すること。
- 5) 溶融状態を長時間続けると、変色する場合があります。