

イージーワックス・ネオ

【形状・構造等】

所に保管してください。

下記成分により構成される。

1. 形状

缶入り60g、及び板状500g

2. 成分

パラフィンワックス、その他

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

歯科インレー铸造用ワックス

融点: 61度

2. 使用目的

インレー、クラウン形成用

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 固形の状態で加熱したインスツルメントで、溶かし
とって築成してください。
- 2) 石膏模型からの離型性を良くする為、必ず分離材を
使用してください。
- 3) 記載の用途以外には使用しないで下さい。
- 4) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- 1) 加熱したワックスを皮膚等に付けないよう注意して
お取り扱い下さい。万が一やけどした場合は、速や
かに薬を塗布し、専門医に診せてください。
- 2) ワックスバス等で長時間溶融状態におくと、色素分
離しますので、ご注意下さい。(不透明色のみ)

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 直射日光に直接あたる場所に長期間放置すると、脱
色する可能性があります。
- 3) 開封後に保管する場合は、缶等の光を遮断する容器
に保管してください。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理
すること。
- 5) 溶融状態を長時間続けると、変色する場合があります。

2. 使用期限

特に使用期限は定めませんが、直射日光が直接当たる
場所に長期間放置すると、変色や物性が変化する場
合があります。容器に入れ直射日光の当たらない場

【包装】

60g缶入り

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 チョーワ株式会社

住所 〒316-0002

茨城県日立市桜川町3丁目9番10号

電話番号 0294-32-2581

販売元 株式会社ビビデント

住所 〒286-0045

千葉県成田市並木町219-157

電話番号 0120-060841