

2015 年 1 月(第 2 班)

届出番号 08B3X000070000010

2012 年 04 月 17 日(第 1 版)

歯科材料 7 歯科用ワックス

一般医療機器

歯科用キャスティングワックス 1G189000

イノベックス

【形状・構造等】

下記成分により構成される。

1. 形状

板状及び缶入

2. 成分

パラフィンワックス、マイクロワックス、その他

特に定めません。

【包装】

60 g 缶入及び 500 g 板状箱入り

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

歯科インレー鑄造用ワックス

融点

: 60 度

2. 使用目的

インレー、クラウン形成用

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 チョーワ株式会社

住所 〒316-0002

茨城県日立市桜川町 3 丁目 9 番 10 号

電話番号 0294-32-2581

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 固形のまま加熱したインスツルメントで、溶かし取り築成するか、ワックスバス等で溶解し、築成して下さい。
- 2) 石膏模型からの離型性を良くする為、必ず分離材を使用してください。
- 3) 記載の用途以外には使用しないで下さい。
- 4) 歯科医療有資格者以外は使用しないで下さい。

2. 重要な基本的注意

加熱したワックスを皮膚等に付けないよう、注意してお取り扱い下さい。万が一やけどした場合は、速やかに薬を塗布し、専門医に診せてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 直射日光に直接あたる場所に長期間放置すると、脱色する可能性があります。
- 3) 開封後に保管する場合は、缶等の光を遮断する容器に保管してください。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 5) 溶融状態を長時間続けると、変色する場合があります。

2. 使用期限

1