


グライディングディスク

【形状・構造等】

下記成分により構成される。

1. 形状

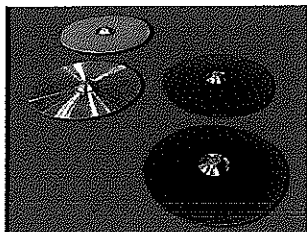

【包装】

- ① ダイヤモンドグライディングディスク 1枚入
- ② クイックダイヤグライディングディスク 1枚入
- ③ コランダムグライディングディスク 1枚入
- ④ ホイルグライディングディスク 2枚入

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 チョーワ株式会社
住所 〒316-0002
茨城県日立市桜川町3丁目9番10号
電話番号 0294-32-2581

2. 成分

アルミナ、コランダム、ダイヤモンド、金属板

3. 種類

- ① ダイヤモンドグライディングディスク
- ② クイックダイヤグライディングディスク
- ③ コランダムグライディングディスク
- ④ ホイルグライディングディスク

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

砥粒の落ちが少なく、高耐久であることから経済性に優れている。

2. 使用目的

石膏模型、埋没材等の外形調整に用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) ディスクをトリマーに取り付ける。
- 2) メインスイッチを入れ給水を確認した後、ディスクにあまり強く押しつけず、軽いタッチで石膏模型等をあてがいます。
- 3) 希望する形態に模型を動かしながら削り、整えてゆきます。

2. 重要な基本的注意

研削時、粉塵等の発生が予想されますので必ず、防塵マスクを着用して、作業に当たってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 3) 直射日光を避けて保管してください

2. 使用期限

特に定めません。