


機械器具(60) 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000

脱ロウ・重合装置 WAPO-EX

【形状・構造等】

下記成分により構成される。

1. 形状

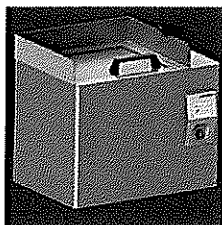

WAPO-EX

2. 構造

品 名	WAPO-MAT
電 圧	220v～240v
消費電力	9.0A
出 力	2000W
本体寸法	660×585×480
重 量	41.0Kg
騒 音	70dB 以下
水 量	21.0L

【使用目的、効能又は効果】

1. 使用目的

義歯製作工程での脱蠟作業及びレジン床、若しくはレジンの重合に用いる

2. 効能効果

- 1) 通常サイズのフラスコを同時に14個重合できる容量と、精密重合に対応した、3ステップの長時間重合プログラムの設定が可能になっている。
- 2) 脱蠟は4床分が同時脱蠟できる構造になっている。二つに分割したフラスコを、本体内部のコンテナに置き、シャワーノズルから出る熱湯で自動脱漏する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- 1) メインスイッチをONにします。
- 2) タッチパネルを操作して、脱蠟プログラム、重合プログラムを選択設定します。
- 3) フラスコを本体タンクに入れます。
- 4) タッチパネルのスタートマークに触れ、プログラムをスタートさせます。
- 5) 本品は、歯科医療有資格者以外が手を触れないよう、適切に管理する事。
- 6) 記載用途以外には使用しない事。

2. 重要な基本的注意

- 1) 本機を運転中、シャワーの熱湯や、本体上部の蓋の金属部に触れないでください。火傷を負う場合があります。
- 2) 使用後は、タンク内を清掃し清潔に保つようにして下さい。専用のワックス除去剤を湯に加えておくと汚れが抑制できます。
- 3) 定期的に付属のカルキ除去剤を用いて、清掃してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 長期間使用しない場合は、電源を外し高温多湿の場所を避けて保管して下さい。
- 2) 使用後は、本体を清掃し清潔に保ってください。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 4) 歯科医療従事者以外が触れないよう適切に管理してください。

2. 使用期限

特に定めません。

【包装】

1台(本体、カルキ除去剤)

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元	チヨウワ株式会社
住 所	〒316-0002 茨城県日立市桜川町3丁目9-10
電 話 番 号	0294-32-2581
FAX	0294-32-2581