

機械器具32 医療用吸引器

一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ 38749000

シリコーンチップ (標準セット)

【禁忌・禁止】

適用対象(患者)

- ・本品の材質に対し過敏症のある患者に使用しないこと。


材質:シリコーンゴム

使用方法

- ・鼻孔の鼻汁の吸引以外の目的で、本品を使用しないでください。
[身体の損傷や健康被害が発生するおそれがある。]
- ・シリコーンチップは、一人につき1個の使用を目的としています。
他の人が使用したシリコーンチップは使用しないでください。[感染症を発症するおそれがある。]
- ・鼻孔に傷、炎症の症状、または出血がある場合は、本品を使用しないでください。[症状が悪化するおそれがある。]
- ・鼻孔の炎症、出血、発熱、感染症などの症状がみられるときには、本品の使用を中止し、医師に相談してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状

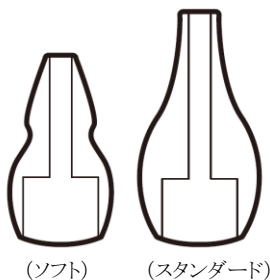

2. 寸法及び重量

- ・シリコーンチップ(ソフト)
 - 先端部外径 : 5.1mm φ
 - 先端部内径 : 3.0mm φ
 - 高さ : 28.0mm
 - 直径 : 16.0mm φ
 - 重量 : 約3g
- ・シリコーンチップ(スタンダード)
 - 先端部外径 : 6.0mm φ
 - 先端部内径 : 3.0mm φ
 - 高さ : 33.0mm
 - 直径 : 17.2mm
 - 重量 : 約4g

3. 原材料

シリコーンゴム

4. 使用環境

- 温度: 5℃～35℃
- 湿度: 15%～95% (結露なきこと)

【使用目的又は効果】

吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する器具をいう。本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 準備

- ・使用前に必ず洗浄、消毒してください。

2. 吸引

- ・シリコーンチップの形状(ソフト、スタンダード)を選択して、吸引器の吸引チューブの先端のチップコネクタに差し込んで接続します。

- ・吸引器の電源をオンにし、鼻の穴にシリコーンチップの先端を優しく当てて、鼻腔内の鼻水を吸引します。

* 組み合わせて使用可能な電動式吸引器

販売名:スルルーノ HY-7035

3. 使用後

- ・使用後は吸引器から取り外し、洗浄、消毒してください。
- ・薄めた中性洗剤に浸してから、軟らかい布やスポンジなどで洗浄します。洗浄後は清潔な水(水道水)で十分に洗い流します。
- ・洗浄後に、75%以下に薄めた消毒用アルコールで消毒してください。
- ・洗浄、消毒後には十分に乾燥させてから、清潔な場所で保管してください。

【使用上の注意】

- ・使用前に本品と組み合わせて使用する電動式吸引器の取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
- ・本品は鼻汁を吸引するための機器です。乳幼児の口や耳などには使用しないでください。
- ・乳幼児が本品を誤って飲み込まないように注意してください。
- ・乳幼児や子供の手の届かないところで、本品を保管してください。
- ・使用前に、本品に傷や汚れがなく、清浄な状態であることを確認してください。汚損している場合には、使用しないでください。
- ・使用前と使用後には、常に本品をきれいに洗浄・消毒して、乾燥させてください。
- ・本品を廃棄するときには、各自治体の取り決めに従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

保管と輸送環境

- 直射日光、及び高温高湿度での長期間の保管を避け、清潔な場所で保管してください。
- 温度: -10℃～50℃
- 湿度: ≤95% (結露なきこと)

【保守・点検に係る事項】

- ・洗浄後に、75%以下に薄めた消毒用アルコールで消毒してください。
- ・洗浄、消毒後には十分に乾燥させてから、清潔な場所で保管してください。
- ・高温蒸気滅菌、ガス滅菌、紫外線滅菌はしないでください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社ちやいなび

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 7-1-10F

電話番号:044-276-8741

<製造業者>

Xiamen High Top Electronic Technology Co., Ltd.(中国)