

機械器具32 医療用吸引器

一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ 38749000

シリコーンチップ (標準セット)

【禁忌・禁止】

適用対象(患者)

- ・本品の材質に対し過敏症のある患者に使用しないこと。


材質:シリコーンゴム

使用方法

- ・鼻孔の鼻汁の吸引以外の目的で、本品を使用しないでください。
[身体の損傷や健康被害が発生するおそれがある。]
- ・シリコーンチップは、一人につき1個の使用を目的としています。
他の人が使用したシリコーンチップは使用しないでください。[感染症を発症するおそれがある。]
- ・鼻孔に傷、炎症の症状、または出血がある場合は、本品を使用しないでください。[症状が悪化するおそれがある。]
- ・鼻孔の炎症、出血、発熱、感染症などの症状がみられるときには、本品の使用を中止し、医師に相談してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観形状

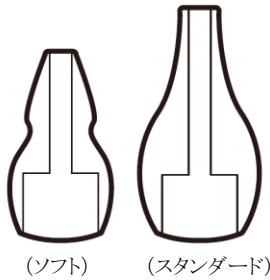

2. 寸法及び重量

- ・シリコーンチップ(ソフト)
 - 先端部外径 : 5.1mm φ
 - 先端部内径 : 3.0mm φ
 - 高さ : 28.0mm
 - 直径 : 16.0mm φ
 - 重量 : 約3g
- ・シリコーンチップ(スタンダード)
 - 先端部外径 : 6.0mm φ
 - 先端部内径 : 3.0mm φ
 - 高さ : 33.0mm
 - 直径 : 17.2mm
 - 重量 : 約4g

3. 原材料

シリコーンゴム

4. 使用環境

温度: 5℃～35℃
湿度: 15%～95% (結露なきこと)

【使用目的又は効果】

吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する器具をいう。本品は汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 準備

- ・使用前に必ず洗浄、消毒してください。

2. 吸引

- ・シリコーンチップの形状(ソフト、スタンダード)を選択して、吸引器の吸引チューブの先端のチップコネクター、或いは「手元吸引タンク」

(別売品)の先端に差し込んで接続します。*

- ・吸引器の電源をオンにし、鼻の穴にシリコーンチップの先端を優しく当てて、鼻腔内の鼻水を吸引します。

*組み合わせで使用可能な電動式吸引器

販売名:スルルーノ HY-7035

3. 使用後

- ・使用後には吸引器から取り外し、洗浄、消毒してください。
- ・薄めた中性洗剤に浸してから、軟らかい布やスポンジなどで洗浄します。洗浄後は清潔な水(水道水)で十分に洗い流します。
- ・洗浄後に、消毒用75%アルコールで消毒してください。*
- ・洗浄、消毒後には十分に乾燥させてから、清潔な場所で保管してください。

【使用上の注意】

- ・使用前に本品と組み合わせる使用する電動式吸引器「スルルーノ HY-7035」、及び使用する場合は「手元吸引タンク」(別売品)の取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。*
- ・本品は鼻汁を吸引するための機器です。乳幼児の口や耳などには使用しないでください。
- ・乳幼児が本品を誤って飲み込まないように注意してください。
- ・乳幼児や子供の手の届かないところで、本品を保管してください。
- ・使用前に、本品に傷や汚れがなく、清浄な状態であることを確認してください。汚損している場合には、使用しないでください。
- ・使用前と使用後には、常に本品をきれいに洗浄・消毒して、乾燥させてください。
- ・本品を廃棄するときには、各自治体の取り決めに従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

保管と輸送環境

直射日光、及び高温高湿度での長期間の保管を避け、清潔な場所で保管してください。

温度: -10℃～50℃

湿度: ≤95% (結露なきこと)

【保守・点検に係る事項】

- ・洗浄後に、消毒用75%アルコールで消毒してください。*
- ・洗浄、消毒後には十分に乾燥させてから、清潔な場所で保管してください。
- ・高温蒸気滅菌、ガス滅菌、紫外線滅菌はしないでください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社ちやいなび

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 7-1-10F

電話番号:044-276-8741

<製造業者>

Xiamen High Top Electronic Technology Co., Ltd.(中国)