

製品番号:1000-B

販売名称: **アルプケイツー 三つ組みペンライト(ミニ)**

一般医療機器 JMDN:14066000

日本製

【形状・構造等】 * 右図参照

- ・ペンライト本体:真鍮ボディ
:クリップスイッチ(ポケットクリップ部)
:11.5φ×139.5mm
:重量 約48g(乾電池を含む)

- ・乾電池:単4 2本

- ・イルミネーター:アクリル製
舌圧用:20mm×99mm
接続部 9.5φ×19mm

耳用:25φ×74mm, 先端 7.4φ
接続部 9.5φ×19mm

鼻用:9.5φ×64mm, 先端 4.0φ
接続部 9.5φ×19mm

- ・専用ケース:ビニールレザー製



【性能・使用目的】

1. 性能


- :電球 2.2V-0.25A ニップル
- :診断部位別に アクリル製イルミネーター を選択

2. 使用目的

ライト光照射による口腔内、鼻腔内および内耳の観察・診断

【使用方法】

1. 本体先端部(イルミネーター取付部)を廻して取り外す。
2. 乾電池をセットし、先端部を取り付ける。(図-1参照)
3. イルミネーターを先端に取り付ける。(図-2参照)
4. クリップスイッチを ON にし点灯する。
(ポケットクリップ先端を本体に接触させると ON になる)
5. イルミネーターを通過するライト光により診断部位を観察する。

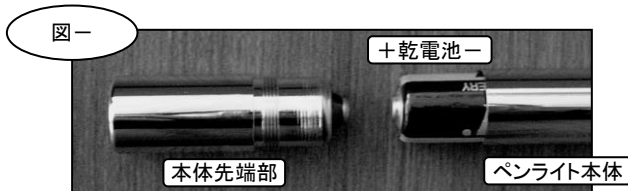

【使用上の注意】

1. 乾電池は正しくセットしてください。
2. イルミネーターは診断部位に合わせて適切な選択をして下さい。
3. イルミネーターは煮沸消毒できません。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は上記に記述した目的以外の使用はしないでください。
2. 本器を長期間使用しない場合は、乾電池を抜いてください。
3. 乱暴な取り扱いはしないでください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 舌圧子は繰り返し使用される医療用具です。又、イルミネーターは 診断部位と接触する付属品です。
衛生上および安全上の適切な管理をお願いします。
3. 部品交換の際は、当社純正部品をお使いください。
4. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】

田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177