


製品番号:4001

販売名称: アルブケイツー 喉頭鏡

一般医療機器 JMDN:70948009

日本製

【形状・構造等】 * 下図および右図参照

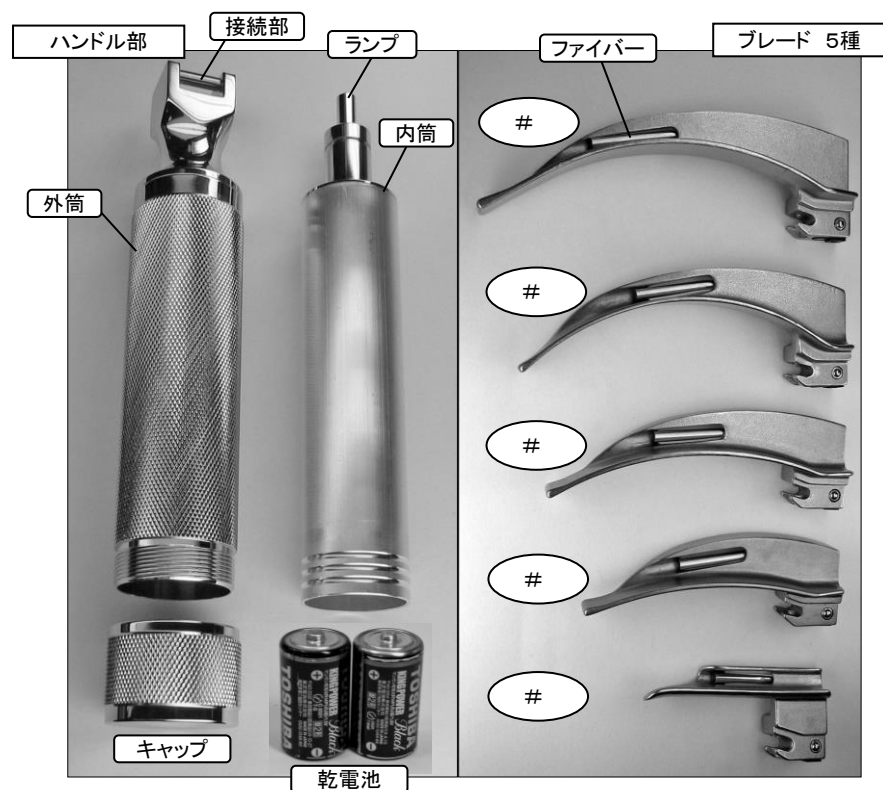

ブレード取付図



【性能】

1. ブレード:

#0:ミラーブレード	75mm
#1:マツキントツシュ	99mm
#2: "	114mm
#3: "	128mm
#4: "	138mm

2. ハンドル:

外筒 真鍮/クロムメッキ
内筒 アルミニウム

3. ハロゲンランプ:2. 5V 1. 7W

4. バッテリー:単2 1. 5V 2本

【使用目的】

ハロゲン光照射による喉頭の観察・診断

* セット全長:約 195mm

* セット重量:約 1200g(乾電池を含む)

【使用方法】

1. ハンドル部外筒のキャップをはずして内筒を取り出す。
2. 内筒に電球をセットする。(購入時はセット済です)
3. 外筒に 2. の内筒を入れ、乾電池をセットしてキャップを締める。
4. ブレードを取り付ける。
(ブレードを取り付けると内蔵されたスイッチが入り点灯する)
5. ファイバー先端から照射されるハロゲン光により喉頭を観察する。
6. 使用後はブレードを外し消灯する。

【使用上の注意】

1. ブレードの取付は、しっかりと確実に行ってください。
2. ブレードは適切な選択をしてください。
3. 乾電池は電極を正しくセットし、キャップはしっかりと締めてください。
4. ブレード及びハンドル外筒はオートクレーブ滅菌が可能です。
5. ハンドル内筒はオートクレーブ滅菌できません。
6. 電球を交換する際は、左記・使用方法 1. ～3. の手順に従い行ってください。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は喉頭の診察以外の目的には使用しないで下さい。
2. 本器は精密光学機器です。
本器を落としたり、乱暴な取扱いはしないでください。
3. 長期間使用しない場合は、乾電池を抜いてください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. ブレードは口腔内で舌と接触します。
オートクレーブで滅菌する等の衛生管理をしてください。
3. 他社部品の使用は事故・トラブルの原因となる場合があります。
修理や部品の交換等は、当社純正部品を使用してください。
4. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】

田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6-26-5
TEL: 03-3892-4481 FAX: 03-3892-4450

【アフターサービス等の問合せ先】

田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3-16-3
TEL: 03-3814-7181 FAX: 03-3814-7177