

チューイングシート

【禁忌・禁止】

1. 変形等の異状が見られたら使用しないこと。
2. 誤飲・誤嚥を起こす可能性のある患者には使用しないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- (1) 本品は耐熱性ではないため、熱を加えないこと。
- (2) 万が一変形、変質、変色をしている製品がある場合には、使用しないこと。
- (3) 本品は消毒することにより再使用できるが、2～3回を目途に新しいものへ交換すること。

2) 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- (2) 誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院にかからせること。

【形状・構造及び原理等】*

- ・本品は板状のポリウレタンゴムでできており、補綴物等(クラウン、インレー、マウスピース、その他)を適合させるのに用いる。
- ・消毒を施すことにより再使用することができる。

材質:ポリウレタンゴム、酸化チタン

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- (1) 直射日光・紫外線・高温・湿気を避けて保管すること。
 - (2) 開封すると湿気を帯びて劣化(強度が低下)するため、開封後は早めに使い切ること。
- (押してみても弾力が弱まっているものは劣化しているため、使わないこと)

【使用目的又は効果】

本品は補綴物等(クラウン、インレー、マウスピース、その他)を適合させるのに用いるゴム製の医療機器である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- (1) 使用に先立ち、消毒用エタノール等で消毒を施す。
- (2) 対象の補綴物等(クラウン、インレー、マウスピース、その他)に本品を当て、上下で咬ませて適合させる。
- (3) 使用後は洗浄・消毒を行い、清潔に保管する。

製造販売 : 株式会社友和製作所
電話番号 : 0465-36-0607
FAX番号 : 0465-36-9171
製造業者 : 株式会社友和製作所