

機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用エラスチック器材 38733000  
**エラスティックチェーン TS**

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

本品は、次の原材料で構成する。

(構造等)

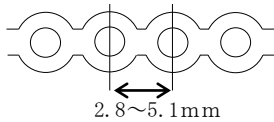

材質: ポリウレタン

(仕様)

厚さ	0.4mm
初期伸び力	1.2N 以上
24 時間後残留力	100%以上

**\* 【使用目的又は効果】**

弾性材料で歯の移動、矯正装置の保持等に用いる。

**\* 【使用方法等】**

- (1) 歯と歯の間、上顎と下顎の間に本品を掛けて、歯又は顎間の牽引を行う場合に使用する。
- (2) 所望する力が発揮できるように、本品を適切な長さに切断しその端部を歯に取付けた矯正器材のフックや牽引用アタッチメントに掛けて歯や顎間に必要な張力を与える。

**【使用上の注意】**

(重要な基本的注意)

- (1) 製品の寿命を著しく低下させるので粗雑な取扱いはしないこと。
  - (2) 患者の口腔内で使用する際には、口腔内を傷つけないように取扱いには十分に注意すること。
- \*\* (3) 変形や変質などの異状が認められた場合は使用しないこと。  
(4) 本品の使用により発疹などの症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診察を受けさせること。

**\* 【保管方法及び有効期間等】**

(保管方法)

- (1) 開封前には特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- (2) 直射日光や紫外線を避け、引き出しなどの暗所に湿気を断ち、袋に入れ保管すること。
- (3) 歯科医療有資格者以外の者が触れないように適切に保管すること。

(有効期間)

使用期限: 製造後 2 年  
[自己認証による。]

**【取扱い上の注意】**

- (1) 感染リスクを避けるため、事前に適切な長さに切断して使用すること。
- (2) 強すぎる牽引力を歯に加えないこと。元の長さの 3 倍以上の伸びは、強すぎる牽引力の原因となる。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元: 株式会社 友和製作所  
電話番号 : 0465-36-0607

販売元 : 株式会社 松風  
電話番号 : 075-561-1112