


歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨剤 JMDN70903000
UVポリッシャー（ユニバーサルポリッシャー）

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造

本品は人造研削材(炭化ケイ素)を合成ゴム等で結合した砥石ある。

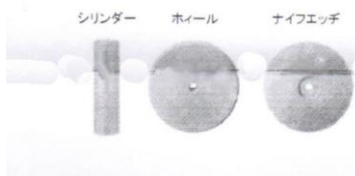

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 藤原歯科貴金属株式会社
住所： 〒543-0016 大阪府大阪市天王寺区餌差町 8-2 明星合同
ハイツ 1F
電話番号： 06-6761-2680
緊急連絡先： 藤原歯科貴金属株式会社 営業部
電話番号： 0120-44-2680
ファックス： 06-6761-5849

2) 仕様

基準寸法	径φmm
型番 #1 シリンダー	21/7
型番 #2 ホイール	22/3
型番 #3 ナイフエッジ	22/3
型番 #4 ポーセレンシリンダー	21/6
型番 #5 ポーセレンホイール	22/3
型番 #6 ポーセレンナイフエッジ	22/3
型番 #7 コバルトシリンダー	21/6
型番 #8 コバルトホイール	22/3
型番 #9 コバルトナイフエッジ	22/3

【使用目的又は効果】

歯科技工物の研削に用いる。

主にポーセレンや貴金属、コバルトクロム合金等の研削に用いる。

【使用方法等】

- 1) 歯科用マンドレルに確実に固定する。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックではない事を確認する。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 5) 確実に装着されている事を確認し、振れ等がなければ本品を研削する部分に軽く押し当て研削する。

【使用上の注意】

- 1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

【最高許容回転速度】

シリンダー：20,000rpm
ホイール・ナイフエッジ：10,000rpm

- 2) 本品を取り付ける歯科用ハンドピースの取扱いは添付文書及び取扱い説明書に記載されている内容を厳守し使用すること。
- 3) 変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- 4) 使用前に回転させてブレがないことを確認すること。ブレのあるものは使用しないこと。
- 5) 本品又は切削屑が目に入らないように保護メガネ等を装着すること。
- 6) 本品を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び感染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外触れないよう適切に保管・管理すること。