

X 線造影材入りガーゼ黒

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ X 線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと
（切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがあるため）

【形状・構造及び原理等】

- ・ X 線造影材を入れたガーゼ製品です。
- ・ ガーゼの材質：綿 100%
- ・ X 線造影材（黒線）の材質：
（固定材）塩化ビニル
（可塑剤）フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
（造影剤）硫酸バリウム
（着色剤）カーボンブラック

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥若しくは汚染からの
器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる
綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。
X 線で検知できる成分を含む。

【使用方法等】

- （1）適宜滅菌して使用する。
- （2）滅菌は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- （1）体内に留置しないこと。
- （2）開封後は早めに使用すること。
- （3）滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
- （4）塩化ビニルの可塑剤が溶出する可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ツムラ

Tel 0725-55-2788