

医 04 整形用品
一般医療機器 X 線造影材入りガーゼ 32374000

X 線造影材入りガーゼ青

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ X 線造影系部分を直接挟んで使用しないこと
(切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがあるため)

【形状・構造及び原理等】

- ・ X 線造影材を入れたガーゼ製品です。
- ・ ガーゼの材質：綿 100%
- ・ X 線造影材（青線）の材質：
(固定材) ポリプロピレン、ポリエステル
(造影剤) 硫酸バリウム
(着色剤) ウルトラマリンブルー グレード 02

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥若しくは汚染からの
器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる
綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。
X 線で検知できる成分を含む。

【使用方法等】

- (1) 適宜滅菌して使用する。
- (2) 滅菌は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- (1) 体内に留置しないこと。
- (2) 開封後は早めに使用すること。
- (3) 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ツムラ
Tel 0725-55-2788